

器71 視力矯正用眼鏡
一般医療機器 眼鏡 35065000

アドレンズ エマージェンシー

【警告】


1. 本器の使用は眼科定期検診を代用するものではありません。
2. 本器はリスクの高い作業(例:車の運転)には使用しないで下さい。
3. 装用中に体調不良を生じた場合は使用を中止して下さい。

【注意】

1. 本器は短期間の緊急用途品です。
2. 本器は遠視、近視又は老眼の視力補正にのみ適用されるものです。
品目仕様の適用度数を確認の上使用して下さい。
3. 本器は目を保護する目的では使用しないで下さい。

【形状・構造及び原理等】

二枚の可動式レンズによる連続度数補正機能を備えた眼鏡

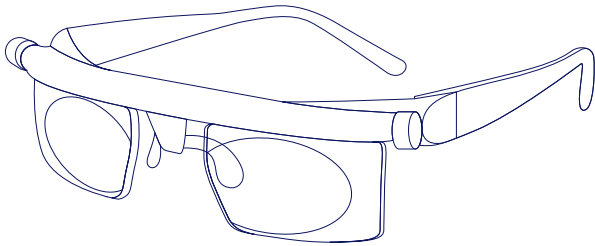

構造	2枚のスライド可変レンズにより構成される度数調節可能な眼鏡
原理	2枚の可動式レンズがスライドすることでレンズの屈折度数を変化

【使用目的】

本品は遠視、近視及び老眼補正用眼鏡である

【効能又は効果】

本品は -6.0 から +3.0 ディオプターの視力補正用に適用される

【品目仕様等】

適用度数：-6.0 ～ +3.0 ディオプター
眼鏡枠寸法：49□25、135mm
瞳孔間距離：66mm
本品は乱視矯正には適しません。

【操作方法又は使用方法等】

(詳細は裏面に記載の通り)

1. 製品を包装ケースから取出し、両側の調節ツマミを前方(遠ざかる方向)へ一杯に回して、普通のメガネのように装用します。
2. 手で左目を覆い目標物を見ながら右側の調節ツマミを後方(手前側)へ回して焦点を合わせます。
3. 必要に応じてツマミを前方又は後方に回して微調節してください。
4. 次に左目の代わりに手で右目を覆います。目標物を見ながら左側の調節ツマミを後方に回して焦点を合わせます。
5. 必要に応じてツマミを前方又は後方に回して微調節してください。
6. 眼鏡はこれで準備完了です。本品は異なる作動距離でも再調節が可能です。この添付文書は眼鏡と共に保存して下さい。

【使用上の注意】

- ・必要とされる作動距離に合わせて必ず度数を適宜調整してください。
- ・使用しないときは保護ケースに収納して保管してください。
- ・レンズ面は傷付き易いので清掃時等は取扱いに注意してください。

【包装】

保護ケース入り本品 1個

【廃棄に関して】

廃棄する際はリサイクルに関する自治体の条例、リサイクル計画に従い、可能であれば指定産業廃棄物処理業者に委託して下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

第三種医療機器製造販売業

アドレンズ・ジャパン株式会社

住所 東京都港区西新橋 3-13-7

MG 愛宕ビルディング 8階

電話番号 03-5408-1523

製造業者

ZEITO PLASTIC COMPONENTS, マレーシア

器71 視力矯正用眼鏡
一般医療機器 眼鏡 35065000

アドレンズ エマージェンシー

警告 アドレンズ エマージェンシーをご使用になる前に

禁止






- 車の運転や他の操縦には絶対に使用しないでください。
- 本器の使用は眼科検診を代用するものではありません。
- 装着中に体調不良を生じた場合は使用を中止してください。

注意 アドレンズ エマージェンシーに関するご使用上の注意

- 本器は緊急用として一時的な使用としてください。
- 本器は遠視、近視又は老眼の視力補正以外の用途で使用しないでください。
- 本器は目を保護する目的では使用しないで下さい。

度数調整 必要とされる作動距離に合わせて、必ず度数を適宜調整してください。

安全上の注意 (表示とその意味)

-  **警告** 誤った取扱をした時に重傷・失明など重大な結果になる可能性があることを示しています。
-  **注意** 誤った取扱をした時に障害を負う可能性や物的損害の発生が想定される事を示しています。
-  一般的な注意が必要なことを示しています。
-  **禁止** 特定の行為の禁止を示しています。
-  特定の行為の義務付けを示しています。


禁止 使用しないときは保護ケースに収納し、保管してください。

ケースに保管する際は、レンズの凸面を上向きにして、格納してください。下向きにするとレンズにキズが入る原因になります。




! レンズ面は傷付き易いので清掃時などは取扱いに注意してください。

使用・度数調整方法

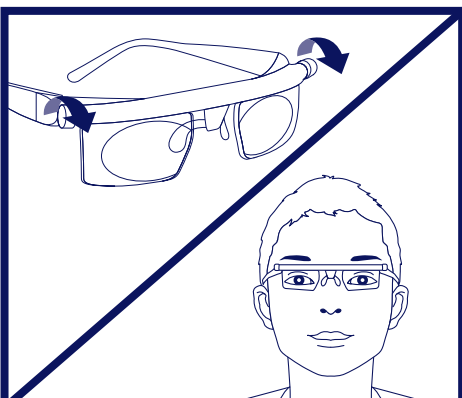


1 両側の調節ツマミを矢印の前方向に一杯に回した上で、普通のメガネのように装着してください。

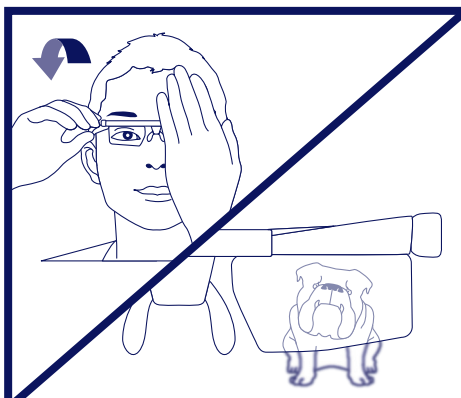

2 手で左目を覆い、遠くの物を見ながらメガネ枠の右側ツマミを後方に回して、焦点を合わせます。



3 必要に応じてツマミを前後に回して、焦点を微調整してください。

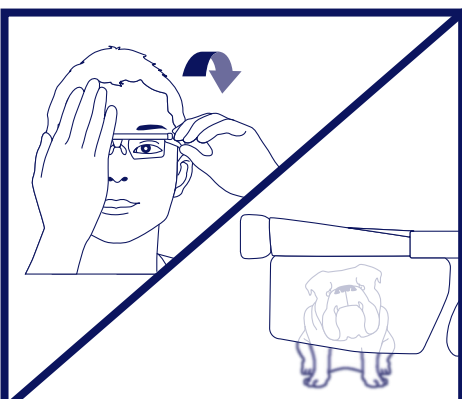

4 次に手で右目を覆い、遠くの物を見ながらメガネ枠の左側ツマミを後方に回して、焦点を合わせます。



5 必要に応じてツマミを前後に回して、焦点を微調整してください。



6 これで準備完了です。

本製品に関するご相談

ご購入店または下記のご相談窓口までお問合せください。

アドレンズ・ジャパン株式会社 お客様相談室 03-5408-5886

受付時間：10:00～17:00（土・日・祝日を除く）